



Sistema di drenaggio a bassissima pressione

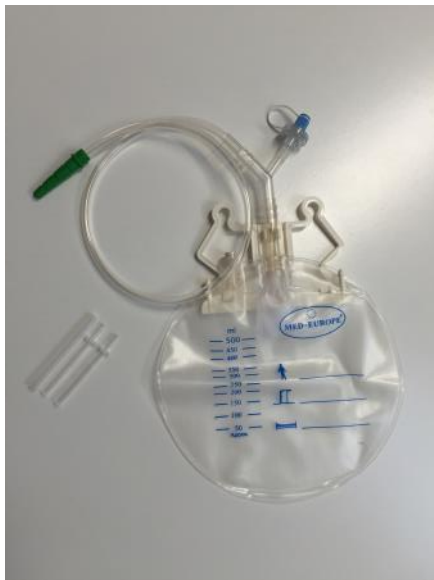

BREVETTATO

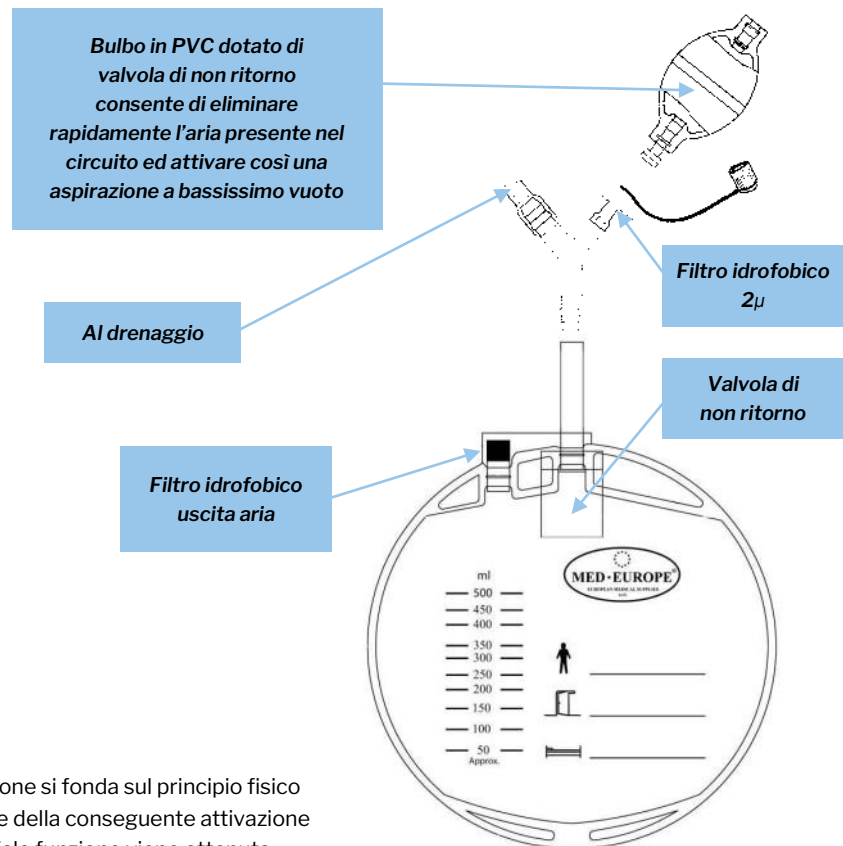

Caratteristiche

- Il sistema di drenaggio a bassissima pressione si fonda sul principio fisico di rimozione dell'aria presente nel circuito e della conseguente attivazione della aspirazione a bassissima pressione. Tale funzione viene ottenuta utilizzando un bulbo dotato di valvola di non ritorno che, applicato sul filtro antibatterico ad elevata efficienza, permette dopo poche e rapide attivazioni la rimozione dell'aria dal circuito. Svoltata questa funzione, il bulbo può essere rimosso ed il filtro sigillato utilizzando l'apposito tappo luer. La pressione massima che il bulbo esercita è di 140 mmHg, quella media di lavoro è di 70mmHg. Un bulbo SIM BULB viene fornito in ogni scatola oppure in confezione singola non sterile (REF MD500.1).
- La sacca di drenaggio da 500ml con valvola di non ritorno (REF MD500) è stata studiata per ridurre il rischio di occlusioni nel tubolare di ingresso.
- Fissaggio al letto del paziente tramite doppio gancio.
- Il tubo di collegamento lungo 900mm dotato di morbido connettore, tagliabile per adattarsi a vari diametri, consente un'ampia gamma di connessioni.
- In dotazione 3 connettori di differente misura.

Codici

- DBP-001*** Sistema di drenaggio a bassissima pressione
 Box da 10 pezzi sterili + 1 pezzo SIM BULB non sterile
 CND A06010199 - RDM 77226/R
- MD500.1*** Bulbo di ricambio non sterile SIM BULB
 Box da 1 pz.
 CND A060399 - RDM 32849/R

Specifiche

- Sacca da 500 ml: prodotta in PVC.
- Bulbo e connettore: prodotti in PVC.
- Tubo di collegamento da 900mm: prodotto in PVC.
- Connettore distale: prodotto in PVC.
- Raccordo a Y: prodotto in SMMA.
- Filtro idrofobico: prodotto in PVC.
- Connettori: PVC/styrolux.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Dispositivo privo di lattice.
- Confezionati singolarmente in busta sterile a doppio involucro.



CLASSE Is
 REGOLA 1



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI EN ISO 13485:2016
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

53

Revisione del 10.09.2020