

Coperta isotermitica oro / argento

Indicazioni d'uso

La coperta isotermitica è un dispositivo medico con la funzione di isolare termicamente dal freddo o dal caldo.

Essa viene utilizzata in situazioni di emergenza (come protezione dagli agenti atmosferici) o di pronto soccorso di ustionati e/o traumatizzati, poiché ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.



CLASSE I
REGOLA 1



Caratteristiche

Il rivestimento di alluminio (lato argento) e di alluminio dorato (lato oro) della coperta ha proprietà di riflessione che ne permettono il duplice scopo di protezione / isolamento dal caldo o dal freddo, in funzione di come viene posizionata sul corpo dell'infortunato. Infatti, se la coperta è posizionata con il lato argento a contatto con il corpo ed il lato oro esterno conserva circa l'80% del calore corporeo (protezione dal freddo), mentre se è posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo ed il lato argento esterno riflette i raggi solari permettendo al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).

Misure: 160 x 210 cm.

Istruzioni per l'uso

Stendere la coperta sul corpo senza stringere.

Posizionare il lato oro esternamente per trattenere il calore (protezione dal freddo) oppure posizionare il lato argento esternamente per riflettere i raggi solari (protezione dal caldo).

Materiale

Il prodotto è costituito da un foglio di poliestere metallizzato, rivestito da un lato di alluminio e dall'altro di alluminio dorato, le cui proprietà di riflessione ne consentono la duplice funzione.

Confezione

La coperta isotermitica è contenuta, ripiegata, in un sacchetto di polietilene trasparente termosaldato.

Ogni confezione contiene istruzioni per l'uso in cinque lingue (compreso l'italiano) e chiare illustrazioni esplicative su possibili utilizzi.

Smaltimento

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Codice

909411581

CND: T030399

RDM: 2222121

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it