

## Cuffia per ipotermia

La cuffia per ipotermia è destinata ai pazienti sottoposti ai trattamenti chemioterapici, per la prevenzione della tossicità ai follicoli dei capelli.

Il kit, composto da tre cuffie, risulta più economico rispetto alla tradizionale singola cuffia in gel, assicurando però la continuità di raffreddamento del cuoio capelluto per un periodo più lungo che permette di affrontare cicli chemioterapici anche di lunga durata.

Le cuffie sono leggere e confortevoli poiché il gel si adatta perfettamente alla configurazione anatomica dell'utilizzatore.

Le cuffie vanno attivate il giorno prima della terapia mediante immersione in acqua tiepida al fine di permettere la trasformazione della polvere contenuta all'interno della cuffia, in gel. Dopo l'attivazione del gel, le tre cuffie vanno asciugate e refrigerate. Vanno indossate, una dopo l'altra (prima, durante e al termine di ogni ciclo), per almeno 40/60 minuti e comunque fino a che non hanno esaurito il proprio potere refrigerante.

**Codice:**

**976386363** Kit composto da 3 cuffie (sacca termica in dotazione). **CND: T0207**

**976386387** Cuffia di ricambio, 1 pz. **CND: T0207**

