

# Gomitiera / talloniere in poliestere

Prevenzione delle piaghe da decubito ai gomiti e talloni nei pazienti lungo degenti a rischi.

Munite di disco supplementare per aumentarne l'efficienza.

Chiusura in velcro regolabile.

Dispositivo medico non sterile.

## Composizione

Poliestere 100%.

## Istruzioni per l'utilizzo

Indossare la gomitiera / talloniera fissandola con l'apposita chiusura in velcro. Per aumentarne l'efficienza, è possibile posizionare il disco supplementare (fornito in dotazione) in corrispondenza del punto critico di appoggio.

## Indicazioni di lavaggio e conservazione

Lavabile in lavatrice a 30°C con sapone neutro.

Non stirare. Asciugare lontano da fonti di calore.



## Avvertenze e controindicazioni

- Seguire le indicazioni del Medico curante.
- Non utilizzare questo indumento su ferite aperte.
- Evitare il contatto con acidi, pomate o grassi.
- Sostituire il prodotto quando il vello risulta consumato.

## Modalità di smaltimento

Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

## Codice

**909068405** Box da 2 pz.



CLASSE I  
REGOLA 1



Distribuito da:



Società certificata  
UNI CEI EN ISO 13485:2021  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

**111**

Revisione del 26.02.2025